





Passende Größe der KidCadCrown® aus dem Set auswählen. Optional die KidCadCrown® passend schleifen (Länge, Breite, Kontaktpunkte mittels kreuzverzahnter Fräse anpassen. Anschließend mit einem Gummi glätten).

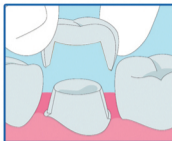


KidCadCrown® im Mund einprobieren.




PermaCem 2.0 in die vorbereitete Restauration applizieren. (Wie auch bei allen gängigen Kompositen zum Einsetzen im Mund, kann die Krone mit Hilfe eines Bonds vorbereitet werden.)

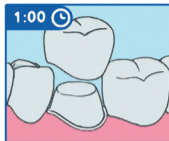

Nach dem applizieren des PermaCem 2.0, Restauration innerhalb von 1 min. nach Mischbeginn einsetzen.

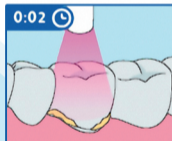


PermaCem 2.0 ist dualhärtend, kann aber durch zusätzliche Lichtgabe beim Aushärten beschleunigt werden. 2 Sekunden vorhärten.

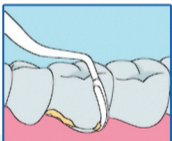

Zementüberschüsse entfernen.



PermaCem 2.0 für 20 Sekunden von allen Seiten lichterhärten und zusätzlich 7 min. aushärten lassen.

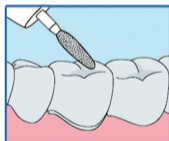

Nun kann die KidCadCrown® an den Gegenkiefer angepasst werden.



Registrierenummer: I-1108001

Einsetzen der Kronen am Beispiel:
PermaCem 2.0 der Firma



Bestellungen unter:
www.vfm-hamburg.de/kinderkronen

